

# Skötselråd

## Rengöring – Daglig vård av insatser

Alla insatser mår bra av att rengöras och ses över från dag till dag. Detta förlänger livslängden avsevärt, säkerställer att insatsen inte missfärgas och framför allt minskar risken för klåda, obehag eller infektioner.

Vi rekommenderar:

1. Att ljudkanal och ventilationskanal rengörs med en tråd, lättare tryckluft eller bara något litet som går att peta med.
2. Att insatsen tvättas i varmt vatten gärna med tvål, diskmedel eller något annat lämpligt.
3. Att insatsen kontrolleras för skador, kolla särskilt slangen mellan knät (fästet på insatsen) och hörapparaten – denna torkar med tiden och kommer behöva bytas.

## Skador eller besvär

Upptäcker du någon skada på din insats, märker att den inte sitter bra, inte är bekväm, återkopplar eller liknande ska du vända dig till din audionom för att få hjälp. Det är jättebra om du kan anteckna, fota eller på annat vis beskriva vad som är fel – detta kan hjälpa både din audionom och oss att åtgärda problemet så bra som bara möjligt.